

### 1. Mô tả sản phẩm

| STT | TÊN CHỨNG<br>LOẠI              | MÔ TẢ                                                                                           |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lab Analog<br>&<br>Ball Analog | Lab Analog/ Ball Analog là sản phẩm được sử dụng trong quá trình sao chép mẫu mô hình nha khoa. |

### 2. Chỉ định sử dụng

Sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ quá trình sao chép mẫu hàm nhằm tái tạo vị trí răng đã mất và phục hình nha khoa.

### 3. Hiệu Quả

Các sản phẩm giúp chuyển giao và tái tạo chính xác vị trí implant hoặc thành phần phục hình, hỗ trợ chế tạo phục hình nha khoa phù hợp với kế hoạch điều trị.

### 4. Hướng dẫn sử dụng

| STT | TÊN CHỨNG<br>LOẠI              | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lab Analog<br>&<br>Ball Analog | 1. Kiểm tra loại và kích cỡ của Lab Analog/Ball Analog được ghi trên nhãn bao bì.<br>2. Sau khi lấy dấu răng để tạo mô hình răng, Lab Analog/ Ball Analog được kết nối với dấu răng và tạo thành nướu mềm theo nhu cầu.<br>3. Đổ thạch cao và tạo mô hình răng. |

### 5. Chống chỉ định

Không sử dụng sản phẩm của thương hiệu khác, vì dễ dẫn đến sai lệch trong phục hình.

### 6. Cảnh báo

- Phẫu thuật cấy ghép bao gồm các thủ tục nha khoa phức tạp đòi hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ phải được đào tạo chuyên môn trước khi sử dụng để có thể thực hiện được phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả.

- Không sử dụng sản phẩm có bao bì bị hở, bị rách.
- Sản phẩm chỉ nên mở ngay trước khi tiến hành cấy ghép tại khu vực sạch sẽ.
- Sản phẩm đã mở nhưng chưa sử dụng thì cũng không được hoàn trả lại cho công ty.
- Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm dùng một lần mà người dùng khử trùng lại.

## 7. Tác dụng phụ

Không có, vì những chủng loại sản phẩm này được sử dụng trong giai đoạn labo.

## 8. Bảo Quản

Bảo quản ở khu vực có độ ẩm thấp và nhiệt độ phòng.

## 9. Chú ý

Vì phẫu thuật cấy ghép nha khoa đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nên sản phẩm chỉ dành cho bác sĩ hoặc nha sĩ sử dụng.

## 10. Tiệt trùng

Sản phẩm không cần tiệt trùng trước khi sử dụng.

## 11. Cơ sở bảo hành

Sản phẩm là thiết bị y tế dùng một lần nên không có chế độ bảo hành.

## 11. Giải thích ký hiệu

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Mã lô                                           |
|  | Mã Model                                        |
|  | Nhà sản xuất                                    |
|  | Ngày sản xuất                                   |
|  | Hạn sử dụng                                     |
|  | Thận trọng                                      |
|  | Không tái sử dụng                               |
| <b>D</b>                                                                            | Đường kính                                      |
| <b>G/H</b>                                                                          | Chiều cao nướu                                  |
| <b>L</b>                                                                            | Chiều dài                                       |
| <b>Rx Only</b>                                                                      | Chỉ được bán theo kê đơn của nha sĩ hoặc bác sĩ |
|  | Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng    |