

Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm

DỤNG CỤ HỖ TRỢ CHẾ TẠO PHỤC HÌNH RĂNG (ĐỒNG DENTIUM IMPLANT SYSTEM)

1. Mô tả sản phẩm

STT	TÊN CHỨNG LOẠI	MÔ TẢ
1.	Fixture Analog & Analog & Abutment Analog	Fixture Analog/ Analog/ Abutment Analog là thiết bị được sử dụng trong quá trình sao chép mẫu mô hình nha khoa.
2.	Burn-out Cylinder	Sản phẩm này là một chụp lấy dấu nha khoa được sử dụng trong giai đoạn labo để tạo mẫu hàm có cấu trúc tương ứng với cấu trúc khoang miệng của bệnh nhân, phục vụ chế tạo phục hình răng.

2. Chỉ định sử dụng

Sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ quá trình sao chép mẫu hàm nhằm tái tạo vị trí răng đã mất và phục hình nha khoa.

3. Hiệu Quả

Các sản phẩm giúp chuyển giao và tái tạo chính xác vị trí implant hoặc thành phần phục hình, hỗ trợ chế tạo phục hình nha khoa phù hợp với kế hoạch điều trị.

4. Hướng dẫn sử dụng

STT	TÊN CHỨNG LOẠI	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1.	Fixture Analog & Analog &	- Kiểm tra loại và kích cỡ của Fixture Analog/ Analog/ Abutment Analog được ghi trên nhãn bao bì. - Sau khi lấy dấu răng để tạo mô hình răng, Fixture Analog/ Analog/ Abutment Analog được kết nối với dấu răng và tạo thành nướu mềm theo nhu cầu.

	Abutment Analog	3. Đồ thạch cao và tạo mô hình răng.
2.	Burn-out Cylinder	1. Kiểm tra đúng loại và kích cỡ của Burn-out Cylinder theo thông tin ghi trên nhãn bao bì. 2. Sau khi hoàn tất quá trình lấy dấu và chế tạo mẫu hàm có gắn analog, lắp Burn-out Cylinder lên analog. 3. Điều chỉnh chiều cao và hình dạng của Burn-out Cylinder theo yêu cầu phục hình. 4. Tiếp tục chế tạo phục hình theo quy trình labo thông thường (bao gồm tạo mẫu sáp, đúc, hoàn thiện và các công đoạn kỹ thuật liên quan).

5. Chống chỉ định

Không sử dụng sản phẩm của thương hiệu khác, vì dễ dẫn đến sai lệch trong phục hình.

6. Cảnh báo

- Phẫu thuật cấy ghép bao gồm các thủ tục nha khoa phức tạp đòi hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ phải được đào tạo chuyên môn trước khi sử dụng để có thể thực hiện được phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả.
- Không sử dụng sản phẩm có bao bì bị hở, bị rách.
- Sản phẩm chỉ nên mở ngay trước khi tiến hành cấy ghép tại khu vực sạch sẽ.
- Sản phẩm đã mở nhưng chưa sử dụng thì cũng không được hoàn trả lại cho công ty.
- Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm dùng một lần mà người dùng khử trùng lại.

7. Tác dụng phụ

Không có, vì những chủng loại sản phẩm này được sử dụng trong giai đoạn labo.

8. Bảo Quản

Bảo quản ở khu vực có độ ẩm thấp và nhiệt độ phòng.

9. Chú ý

Vì phẫu thuật cấy ghép nha khoa đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nên sản phẩm chỉ dành cho bác sĩ hoặc nha sĩ sử dụng.

10. Tiệt trùng

Sản phẩm không cần tiệt trùng trước khi sử dụng.

11. Cơ sở bảo hành

Sản phẩm là thiết bị y tế dùng một lần nên không có chế độ bảo hành.

11. Giải thích ký hiệu

	Mã lô
	Mã Model
	Nhà sản xuất
	Ngày sản xuất
	Hạn sử dụng
	Thận trọng
	Không tái sử dụng
D	Đường kính
G/H	Chiều cao nướu
L	Chiều dài
Rx Only	Chỉ được bán theo kê đơn của nha sĩ hoặc bác sĩ
	Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng